

## Produktbeschreibung:

Die ETM-Maske ist eine nachhaltige und wiederverwendbare Behelfsmaske aus einem flexiblen und desinfizierbaren thermoplastischen Kunststoff mit wechselbarem Filterelement. Die verwendeten Materialien des Maskenkörpers, des Verschlusses und des Abstandhalters entsprechen der Lebensmittelkonformität nach EU-Norm 10/2011.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 x Verschlusselement vormontiert mit Abstandhalter
- 3 x Filterelement auswechselbar
- 1 x Maskenkörper
- 1 x elastisches Band
- 1 x 2-fach Kordelstopper

Die Maske verringert bei korrektem Gebrauch die Übertragung durch Tröpfcheninfektion auf andere Personen im unmittelbaren Umfeld.

Produktinweis: Die ETM-Maske bietet dem Träger keinen Selbstschutz. Sie entspricht weder den Bestimmungen als Medizinprodukt noch den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einer persönlichen Schutzausrüstung. Die ETM-Maske erfüllt aktuell **keinen** der folgenden Standards: N95, FFP2, FFP3.

Weitere Hinweise, sowie die Gebrauchs- und Reinigungsanleitung entnehmen Sie bitte den Beschreibungen auf Seite 1 und 2.

## Kontakt:

etm GmbH  
Schönbrunn 180  
D - 07929 Saalburg-Ebersdorf

[maske@etm-international.de](mailto:maske@etm-international.de)

## Vorteile der ETM-Maske:

1. Die ETM-Maske ist ein langlebiges Produkt aus lebensmittelkonformen Kunststoffen.
2. Wiederverwendbar durch leichten Austausch der Filter.
3. Hoher Tragekomfort durch individuell verstellbare und an die Kopfform wie auch Frisuren anpassbare Befestigungsbänder. Die Maske kann sowohl hinter den Ohren, als auch hinter dem Kopf befestigt werden.
4. Stabiler Sitz der Maske um Nasen- und Mundpartie durch flexibles, jedoch formstabiles Material. Die Maske ist auch für Barträger und/oder Brillenträger geeignet, da sie das „Anlaufen“ und Beschlagen der Gläser verhindert.
5. Kein Ansaugen der Maske beim Atmen.
6. Einfache manuelle Reinigung des Maskenkörpers mit Spülmittel und warmem Wasser oder handelsüblichen Reinigungsmitteln.
7. Keine langen Lieferzeiten durch Produktion aller Teile und Vertriebsitz in Deutschland.

## Allgemeine Hinweise:

- Grundsätzlich gilt die Einhaltung aller von den Behörden erlassenen Vorschriften für die /den Maskenträger.
- Der vorgegebene Sicherheitsabstand zu anderen Personen muss trotzdem eingehalten werden.
- Vor dem Anziehen der Maske und dem Wechsel des Filterelementes bitte die Hände waschen, um Kontaminationen zu vermeiden.
- Die Maske muss so über Mund, Nase und Wangen platziert werden, dass sie überall dicht anliegt. Dazu ggf. die Gummibänder justieren.
- Vor Verwendung der Maske sollte die Atemfähigkeit unter der Maske geprüft werden.
- Bei dauerhafter Benutzung ist das Filterelement gegebenenfalls mehrmals täglich zu wechseln.
- Nach Gebrauch bitte die Hände mindestens 20 - 30 Sekunden gründlich mit Seife waschen.
- Die Entsorgung gebrauchter Filterelemente kann entsprechend der jeweiligen kommunalen Vorgaben zur Mülltrennung erfolgen.
- Die Maske ist **nicht** für Säuglinge und Kinder geeignet.
- **Bitte bewahren Sie die Maske außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

## HINWEIS vor Gebrauch:


Bitte reinigen Sie die Maske vor dem Zusammenbau und Gebrauch erstmalig mit Wasser und Spülmittel entsprechend der umseitigen Reinigungshinweise.

## Montageanleitung zur Befestigung hinter den Ohren

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Schritt 1: Hände waschen</b></p>  | <p><b>Schritt 2: Auspacken und reinigen</b></p>  <p>Maskenkörper und Verschlusselement müssen nach dem Auspacken zuerst gereinigt werden. Dabei empfehlen wir ein Auswaschen unter warmem Wasser mit handels- und haushaltsüblichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.</p> | <p><b>Schritt 3: Band montieren</b></p>  <p>Das Vorgehen gilt für beide Seiten. Bitte achten Sie darauf, dass das Band am Ende gleich lang ist und über die Vorderseite des Maskenkörpers führt. Diese Variante ist zur <b>Befestigung hinter den Ohren</b> gedacht.</p> |
|--|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Schritt 4: Kordelstopper anbringen</b></p>  <p>Die Enden des Bandes <b>HINTER</b> dem Verschlussstück können bei Bedarf verknotet werden.</p> | <p><b>Schritt 5: Filter einsetzen/wechseln</b></p>  <p>Der Stern wird zum Öffnen und Schließen um 60° gedreht. Dabei spielt die Drehrichtung keine Rolle. Das untere Gitter dient als Schutz des Filterelementes und bleibt beim Öffnen und Schließen in Position. Das Gitter wird nicht mitgedreht.</p> | <p><b>Schritt 6: Maske anpassen</b></p>  <p>Die Band-Enden sind so festzuziehen, dass die Maske nicht im Gesicht drückt. Durch das Festziehen soll lediglich ein sicherer Sitz gewährleistet werden.</p> |
|---|---|--|


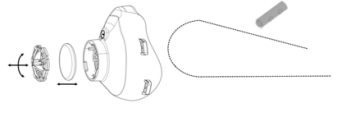

## Montageanleitung zur Befestigung hinter dem Kopf

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Schritt 1: Hände waschen</b></p>  | <p><b>Schritt 2: Auspacken und reinigen</b></p>  <p>Maskenkörper und Verschlusselement müssen nach dem Auspacken zuerst gereinigt werden. Dabei empfehlen wir ein Auswaschen unter warmem Wasser mit handels- und haushaltsüblichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.</p> | <p><b>Schritt 3: Band montieren</b></p>  <p>Das Vorgehen gilt für beide Seiten. Bitte achten Sie darauf, dass das Band am Ende gleich lang ist und durch beide Befestigungslaschen des Maskenkörpers führt. Diese Variante ist zur <b>Befestigung hinter dem Kopf</b> gedacht.</p> |
|---|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Schritt 4: Kordelstopper anbringen</b></p>  <p>Die Enden des Bandes <b>HINTER</b> dem Verschlussstück können bei Bedarf verknotet werden.</p> | <p><b>Schritt 5: Filter einsetzen/wechseln</b></p>  <p>Der Stern wird zum Öffnen und Schließen um 60° gedreht. Dabei spielt die Drehrichtung keine Rolle. Das untere Gitter dient als Schutz des Filterelementes und bleibt beim Öffnen und Schließen in Position. Das Gitter wird nicht mitgedreht.</p> | <p><b>Schritt 6: Maske anpassen</b></p>  <p>Die Bänder sind so festzuziehen, dass die Maske nicht im Gesicht drückt. Durch das Festziehen soll lediglich ein sicherer Sitz gewährleistet werden.</p> |
|--|---|--|

## Reinigungshinweise:

1. Entfernen Sie bitte vor der Reinigung der Maske den Filter und den Verschluss, sowie die Befestigungsbänder und den Kordelstopper
2. Reinigen Sie die Maske durch Ausspülen mit warmem Wasser und wahlweise unter Verwendung von Spülmittel
3. Verwenden Sie keine scharfen oder chlorhaltigen Reinigungsmittel, um eine Oberflächenbeschädigung der Maske zu vermeiden

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Schritt 1: Hände waschen</b></p>  | <p><b>Schritt 2: Maske demontieren</b></p>  <p>Vor dem Waschen ist die Maske in die jeweiligen Einzelteile zu zerlegen. Dazu bitte den Filter ausbauen, Band abziehen und Kordelstopper demontieren.</p> | <p><b>Schritt 3: Reinigung</b></p>  <p>Der Maskenkörper und der Verschluss können nun gereinigt werden. Dabei empfehlen wir ein Auswaschen unter warmem Wasser mit handels- und haushaltsüblichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.</p> |
|--|---|--|

**Schritt 4: Montage gemäß der Montageanleitung**